

Skuter elektryczny DH0322 dla seniorów i nie tylko.

Wózek/pojazd dla seniorów lub osób potrzebujących. Łatwy w obsłudze i bardzo poręczny.

Bateria wyjmowana i ładowana np. w mieszkaniu. Wózek jest na tyle poręczny, że mieści się do windy, komórki, wjedzie przez standardowe drzwi do mieszkania.

Trzy poziomy biegów do przodu i jeden do tyłu.

Sygnal dźwiękowy, wskaźnik naładowania baterii, światło przednie i tylne, kierunkowskazy.

Bateria i uruchomienie zamykane na kluczyk.

Prędkość maksymalna 20 km/h

Zasięg maksymalny, na jednym ładowaniu do 35 km.

Przewidywana ilość cykli na jednej baterii 500 (średnio kilka lat użytkowania)

Dwa koszyki na zakupy, jeden z przodu i jeden z tyłu.

Szeroki podest, na którym zmieści się również torba.

Rozmiar kół 12 "

Napięcie 48 V

Bateria litowa i silnik o mocy 300 W

Podłokietniki i oparcie składane wyjmowane.

Wymiary wózka maksymalne: długość z koszykami 115 cm, szerokość z podłokietnikami 60 cm, wysokość z oparciem 93 cm. Całkowita nośność wózka 150 kg.

Producent Chiny CN

Wózek przygotowany do samodzielnego montażu dla osoby z niewielkim doświadczeniem technicznym (1 osoba 5 h).

Wózek zapakowany w karton o wymiarach długość 102 x 47 x 43

Do montażu udostępnione są krótkie filmiki i zdjęcia

Montaż najlepiej zacząć od zamontowania kierunkowskazów na błotnikach, następnie błotniki, hamulce, koła, itd.

Należy zwrócić uwagę na połączenia kabli zgodnie z kolorami oraz strzałkami, szczególnie połączenie koła przedniego zawierającego w sobie silnik z wiązką zasilającą. → ←

Ładowanie baterii zasilaczem od 4 do 6 h. Zapalona czerwona dioda oznacza ładowanie, a zielona stan naładowania. Baterię należy doładować przynajmniej raz na kwartał, gdy wózek nie jest używany.

Skuter może być używany również przez inwalidów, ale nie jest przeznaczony dla osób ze znaczną niepełnosprawnością z uwagi na jego prędkość i wagę.