

 **Aqua-Gel®**  
opatrunek hydrożelowy

 **KIKGEL**

**Sterylny** opatrunek hydrożelowy

do leczenia **ran i oparzeń**

Produkt **REFUNDOWANY\***

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie  
z instrukcją używania lub etykietą.

## ZASTOSOWANIE

- Oparzenia I, II oraz III stopnia
- Oparzenia słoneczne
- Owrzodzenia
- Odleżyny
- Otarcia, stłuczenia, obrzęki
- Inne rany przewlekłe (np. stopa cukrzycowa)




**Aqua-Gel®**  
opatrunek hydrożelowy


Zawartość wody w opatrunku Aqua-Gel wynosi ponad 90%, natomiast polimery wchodzące w jego skład tworzą trójwymiarową, przestrzenną sieć. Tego typu budowa wyróżnia opatrunki hydrożelowe na tle innych opatrunków specjalistycznych i decyduje o ich wyjątkowych cechach:

- zapewnieniu odpowiedniego poziomu uwodnienia tkanek dzięki właściwościom nawilżającym i jednocześnie absorpcyjnym,
- działaniu kojącym i uśmierzającym ból,
- doskonałej elastyczności, pełnej biogodności.

## SPOSÓB APLIKACJI OPATRUNKU:

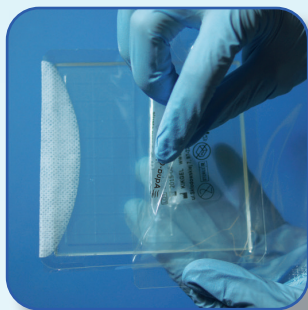


1.  
Rozewnij torebkę i wyjmij foremkę z opatrunkiem.

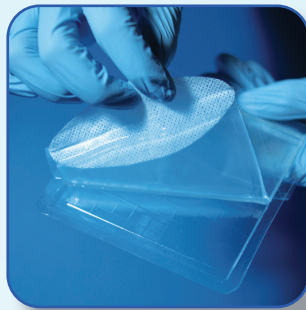


2.  
Trzymając za cieką folię oraz wystający materiał włókninowy, wyjmij hydrożel z foremki.

## WŁAŚCIWOŚCI

- Utrzymuje optymalne, **wilgotne środowisko** na powierzchni rany, dzięki czemu procesy epitelializacji ulegają przyspieszeniu.
- Posiada **właściwości absorpcyjne** – wydzielina wraz z mikroorganizmami zatrzymywana jest w strukturze hydrożelu.
- Wspomaga autolityczne **oczyszczanie rany** z martwych tkanek.
- **Wykazuje dobrą adhezję** do rany, lecz bez tendencji do przyklejania się, dzięki czemu zmiana opatrunku jest bezbolesna dla pacjenta.
- Stanowi **barierę dla zakażenia** z zewnątrz, jednocześnie jest przepuszczalny dla gazów.
- Umożliwia **łatwe doprowadzanie leków** – poprzez iniekcję pod opatrunek lub nasączenie opatrunku w roztworze leku przed zastosowaniem.
- Jest **elastyczny i miękki**, jednocześnie wystarczająco mocny, dzięki czemu może być stosowany do pokrywania trudnych do zaopatrzenia powierzchni ciała, takich jak stawy, dłonie czy twarz.
- Przezroczysty płat hydrożelu **umożliwia obserwację rany**.
- **Likwiduje ból**, dając choremu uczucie kojącego działania.
- **Nie powoduje uczuleń**, jest niealergizujący.

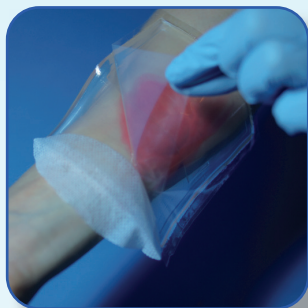


3.  
Nałóż na ranę i zdejmij  
cienką folię przykrywającą  
opatrunek.

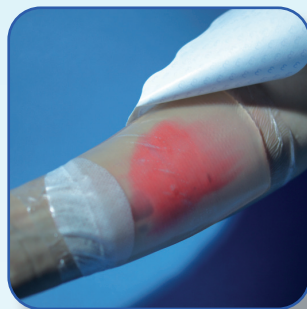

4.  
Umocuj opatrunek za pomocą  
przylepca włókninowego, folii  
poliuretanowej lub bandaża.

# OPATRUNKI **AQUA-GEL** DOSTĘPNE SĄ W NASTĘPUJĄCYCH ROZMIARACH:

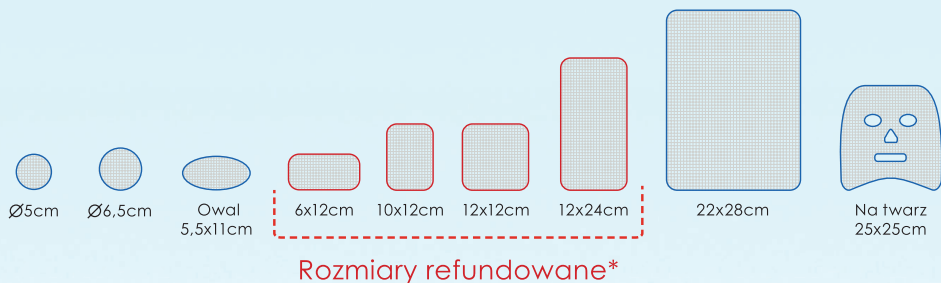

## Zestaw Pierwsza Pomoc

Ø6,5 cm; owal 5,5x11 cm; 10x10 cm



# KIKGEL

**KIKGEL Sp. z o.o.**

ul. M. Curie-Skłodowskiej 7 | 97-225 Ujazd

tel. 44 719 23 40 | e-mail: [biuro@kikgel.com.pl](mailto:biuro@kikgel.com.pl)

[www.kikgel.com.pl](http://www.kikgel.com.pl)



\*w przypadku przewlekłych owrzodzeń oraz Epidermolysis Bullosa, opatrunki Aqua-Gel w rozmiarach: 6x12 cm, 10x12 cm, 12x12 cm, 12x24 cm **podlegają refundacji**.